

## 点検確認書

新鋭工業 東京支店  
03-3816-0444

点検担当者： 小味

|       |               |      |             |      |              |
|-------|---------------|------|-------------|------|--------------|
| 点検年月日 | 平成 30年 4月 16日 | 機種名  | ONW-10      | 製造機番 | 001016       |
| 設置場所  |               |      |             | TEL  | 03-3891-5858 |
| 設置時期  | 平成 20年 6月 16日 | 使用時間 | 783<br>(69) | 御対応者 |              |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                         |                          |
|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                         |                          |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                      | <input type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                      | <input type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                      | <input type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                      | <input type="checkbox"/> |
| ランプ類       |      |                                     |                                         |                          |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                      | <input type="checkbox"/> |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                      | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                         |                          |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |                                         |                          |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度：0.50 mg/L                            |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                         |                          |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度：88.9% 流量：0.80 L/min 圧力：0.09~0.17 MPa |                          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                         |                          |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |                                         |                          |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                      | <input type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                      | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                      | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量 | コメント                          |
|----------|----|-------------------------------|
| 吸着筒      | 一式 | 定期点検作業実施致し<br>今回で定期点検最終となります。 |
| 吸湿筒      | 一式 |                               |
| ドレン用フィルタ | 一個 |                               |
| オゾン分解触媒  | 一個 |                               |
| 吸盤       | 3  |                               |

年 月 日

ご署名

飯土用 誠也

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。