

点検確認書

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部

点検担当者：



点検年月日	平成29年10月24日	機種名：ONW-10	製造機番 000412
設置場所			TEL：
設置時期	平成 年 月 日	運転回数	御対応者

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：94.5 % 流量：0.77 L/min 圧力：0.155 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☒ 一個	
吸湿筒	交換 ☒ 一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

2017 年 10 月 24 日

ご署名

東京都小金井市堀野町4-11-13
くろだ内科医院

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

TEL 0422-53-5888