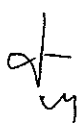


株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	板橋 グレース歯科医院	製造番号	300114	ご確認	
	住所	東京都板橋区本町11-7	納入検査実施日	2020年12月16日		
		1F 101	納入検査実施者	鈴木 一紀		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレイのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水	性能評価	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致
	✓	装置正面のコネクタからの水漏れ(無いこと)		✓	B&Dテスト実施 
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	設置スペースの確保		✓	装置内運転時異音
	✓	右90×左50×背面75×天面250mm以上			
		熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと			

特記事項 ※ 設置スペース 背面 500mm

※ 水平確認 (左側1ステンレス, 右側1木製) 多少段差あり。高さ調整、アジャスタ調整
