

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____

発行日：平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300336
作業年月日	平成 30 年 5 月 21 日		作業時間： _____ Hr
顧客名	芦谷医院 様		TEL： 042-321-3678
所在地	東京都国分寺市西恋ヶ窪2-17-14-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 6 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 <u>4</u> 回 <u>4</u> 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒		殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒		エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 364
オゾンセンサ	正常 ☒	0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐			☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

正常運転

装置情報	交換後運転回数： 399	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 22	殺菌/消毒+7L： 1836
	リークチェック： 2	自己洗浄： 904	アルコール単独： 3	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	オゾン水内視鏡（清）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	オゾン水内視鏡		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

本田 恵利

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

印の

印