

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-65347

No. 180803

配布先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	田村クリニック 様	機番	300215
環営	所在地	東京都多摩市落合 1-32-1	納入日	平成 26 年 2 月 14 日
環品	点検者	IHI アグリテック 中澤 一裕	受付日	平成 30 年 3 月 6 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 30 年 9 月 1 日

修理依頼・不具合内容

- ・オゾン水生成注意（E:110） 原因調査
- ・定期保守点検 および 部品交換

不具合原因（故障箇所）と処置

修理が遅れまして大変申し訳ありませんでした。下記の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果

分解点検したところ、オゾン発生装置に水が浸入していました。
このためオゾン性能が一時的に下がり「オゾン水生成注意」が発生しました。
総運転回数が 1 万回を超えており、部品の劣化が原因と考えられますので
保守点検とあわせて交換いたしました。

写真 1：定期交換部品 一式



写真 2：メインポンプ、排水ポンプ、排気ファン ほか



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・下表と写真をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常

〔3〕出荷時装置情報

交換後運転回数：1524→0（リセット） 消毒：5132、消毒+アルコール：6145
リークチェック：3、自己洗浄：1200、アルコール単独：2243、エア単独：2

承認
若井
18.9.3
審査
中澤
18.9.3
作成
H30.9.3
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品、メインポンプ、排水ポンプ	1 式	
	排気ファン、エアポンプ、配管・フタパッキン	1 式	
	電磁弁、アスピレータ、マニホールドブロック	1 式	今回無償
	ドレンモータ、リークチェックコネクタ（本体側）	1 式	今回無償

（株）IHI アグリテック （旧社名：IHI シパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528