

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300148
作業年月日	平成 30 年 5 月 31 日		作業時間：Hr
顧客名	さいたま新開橋クリニック 様		TEL：048-795-4760
所在地	埼玉県さいたま市西区宮前408-1		ご担当 様
販売店	サンメディックス株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/2 E-200 脈動圧異常
4/20 E-205 オゾン濃度異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 332
オゾンセンサー	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ 取手部破損	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

正常運転、専用トレー（定価＝¥22,500 税別 商品コード 000811030）の
買い換えをお勧め致します。

装置 情報	交換後運転回数：1572	更新（リセ）実施・未実施	殺菌/消毒：17548	殺菌/消毒+7L：4449
	リークチェック：5	自己洗浄：1208	アルコール単独：1	エア単独：4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	給水・排水フィルタ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 5 月 31 日

ご署名

苗地 優子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

