

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 181010

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	陽光医院 様		機番	100531
環営	所在地	千葉県四街道市山梨 761-1		納入日	平成 24 年 07 月 25 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 30 年 07 月 18 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 30 年 10 月 09 日

修理依頼・不具合内容

- ・保守点検 および 各部清掃
- ・ヒーター異常 (E:105) 点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・ヒーター異常につきまして
タッチパネルの異常履歴を確認すると、排気ファン故障 (E:103) でした。（写真 1）
コントロール基板が「排気ファン」や「ヒーター」からの電気信号を受信できないことが原因でしたので、この基板を交換しました。
- ・定期保守点検と内部清掃を実施しました。

写真1：異常履歴画面

写真2：基板、タッチパネル および 定期交換部品



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：466→5 殺菌：3184、殺菌+アルコール：1、リークチェック：252
自己洗浄：1347、アルコール単独：0、エア単独：1771

承認



審査



作成

H30. 10. 10
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 濃度計、センサ、触媒、排水栓、コネクタ、フィルタ	1 式	
2	コントロール基板	1 枚	
3	タッチパネル	1 台	

（株）IHI アグリテック （旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 1 7 0 - 6 TEL:086-944-6528