

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	02-66311	No. 181019
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	ばんクリニック 様	機番	100554
環営	所在地	静岡県御殿場市川島田 1561-2	納入日	平成 24 年 08 月 17 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成 30 年 06 月 06 日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 30 年 10 月 15 日

修理依頼・不具合内容

・保守点検 および 各部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

分解点検したところ、排水系統が水垢類で黒くなっておりました。
排水栓は「フィルター」の役目もあるので、黒い物が引かかったのは正常と考えます。
しかしながら、写真3の状態なので排水系統（ドレンASSY）を一式交換いたしました。
なお、消毒中は排水栓が閉じて内視鏡側と排水側を衛生的に遮断する構造になっております。
このほかに定期保守点検を実施しました。

写真1：定期交換部品

写真2：タッチパネル、ドレンASSY

写真3：排水栓側 拡大



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：338→3 殺菌：1847、殺菌＋アルコール：319、リークチェック：1
自己洗浄：138、アルコール単独：0、エア単独：2

承認
若井
18.10.19
審査
中澤
18.10.19
作成
H30.10.19
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 濃度計、センサ、触媒、排水栓、コネクタ、フィルタ	1 式	
2	タッチパネル	1 台	操作は変わりありません
3	ドレンASSY（排気・排水配管）	1 式	
4	濃度計チューブ	3 本	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528