

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301236
作業年月日	平成 30 年 7 月 3 日	作業時間： Hr
顧客名	新宿野村ビルメディカルクリニック 様	TEL： 03-6233-8921
所在地	東京都新宿区西新宿 12-26-2 新宿野村ビル5階	ご担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社	ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 7 月 28 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/15 E:110・207 オゾン発生機注意、異常名1回。
オゾン分解工程で異常発生。→ 9.5分エー

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒ 0.1
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒

殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 361
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありせん。今回は無償サービスとなります。次回お預金
¥70,000（税別）となります。

装置 情報	交換後運転回数： 576	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 299	殺菌/消毒+アル： 277
	リークチェック： 0	自己洗浄： 110	アルコール単独： 25	エア単独： 286

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 黒田 孝 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
	

Ver.3.1