

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180705
発行日：平成 30 7 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100107
作業年月日	平成 30 年 7 月 2 日		作業時間： Hr
顧客名	ムラタ胃腸内視鏡クリニック 様		TEL： 042-276-8865
所在地	東京都三鷹市下連雀3-2-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 22 年 5 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・ <u>引取</u>	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
定期保守点検 および オーバーホール

不具合原因、作業内容
ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 347
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
・ 交換部品の詳細は別紙「100107号 工事写真」をご参照ください。
・ タッチパネルを交換しましたが、操作上の変更はありません。

装置 情報	交換後運転回数：1044→2	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 980	殺菌/消毒+7L： 8995
	リークチェック： 87	自己洗浄： 1757	アルコール単独： 555	エア単独： 7

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	1 式	酸素、給水電磁弁		☒	1 式
メイン、排水、エアポンプ		☒	1 式	アルコールライン電磁弁		☒	1 式
排気ファン		☒	1 台	配管パッキン、フタパッキン		☒	1 式
ドレンバルブ ASSY		☒	1 式	タッチパネル（カラー型）		☒	1 式
マニホールド電磁弁		☒	1 式	フロントパネル、トレ ASSY		☒	1 式

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
工場点検につき不要です	
ご署名	印

修理業者	株式会社 IHI アグリテック（旧社名 IHI シバウラ） 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528	責任技術者	作業者

1:定期交換部品 一式



2:ポンプ類、排気ファン、ドレンバルブASSY、トレイASSY、フロントパネル



3:配管パッキン、フタパッキン、タッチパネル、マニホールド電磁弁、酸素、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁

