

名越内科医院

御中

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者: 村松(裕) 村松(竜)

|       |                  |      |        |                   |        |
|-------|------------------|------|--------|-------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成 30 年 2 月 28 日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番              | 001822 |
| 設置場所  |                  |      |        | TEL: 048-735-6627 |        |
| 設置時期  | 平成 年 月 日         | 使用時間 |        | 御対応者              |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                              |                                     |
|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                              |                                     |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>            |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>            |
| ランプ類       |      |                                     |                                              |                                     |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                              |                                     |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 性能確認       |      |                                     |                                              |                                     |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 0.5 mg/L                                 |                                     |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                              |                                     |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 95.4% 流量: 1.79 L/min 圧力: 0.097~0.166 MPa |                                     |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                              |                                     |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 清掃         |      |                                     |                                              |                                     |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                           | <input type="checkbox"/>            |

| 交換部品     | 数量 | コメント |
|----------|----|------|
| 吸着筒      | 一式 |      |
| 吸湿筒      | 一式 |      |
| ドレン用フィルタ | 一個 |      |
| オゾン分解触媒  | 一個 |      |
|          |    |      |
|          |    |      |

H 30 年 2 月 28 日

ご署名

名越啓史



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。