

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 31 年 2 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100204
作業年月日	平成 31 年 2 月 22 日	作業時間： 1.0 Hr
顧客名	ファミリークリニック高井戸 様	TEL： 03-5346-7390
所在地	東京都杉並区高井戸3-28-6	ご担当 様
販売店	久栄医療株式会社	ご担当 様
納入年月日	平成 23 年 1 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
トレー取手部破損あり 完全に壊れてしまった際は久栄医療様に御注文して下さい。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 389
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒ 取手部破損あり	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
動作異常無し
ポンプ残量少なかった為、スポンポンに付け替えしました。

装置情報	交換後運転回数： 162	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 809	殺菌/消毒+7L： 729
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1129	7Lコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2019年 2 月 22 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 天野 内 嘉	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	小味