

大竹外科胃腸科

御中

点検確認書

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部

点検担当者:

新鋭工業 早坂

点検年月日	平成 31 年 3 月 8 日	機種名	ONW-10	製造機番	001340
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 19 年 5 月 31 日	運転回数	8731	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水 (洗い)	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.425	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	93.3	%	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.80~0.148
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☒		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一個	
吸湿筒	交換 ☒	一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	
吸盤	交換 ☒	三個	
	交換 ☐		



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

東京都文京区本郷3-12-5

TEL03-3816-0444 FAX03-3816-0406

H31 年 3 月 8 日

ご署名

伴野

印