

ネオポリスハヤシ医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

フィルタ-上の黒い物質確認お応

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成29年 3月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	: 001222
設置場所	埼玉県吉川市吉川656-16			TEL	: 048-981-0510
設置時期	平成18年9月28日	運転回数	966	御対応者	林事務長

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L				
オゾンインジケータ	正常	☒					
酸素発生	正常	☒	濃度： 91.4 % 流量： 0.77 L/min 圧力：0.102～0.175 MPa				
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☒			
内部	正常	☒	清掃	☒			
洗浄コネクタ 富士純正品	正常	☐	調整	☐	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	排水系路で中心に分解清掃しました。
ドレンフィルタ	交換 ☒	1	
吸着筒、吸湿筒	交換 ☐	1	
排水シリコンチューブ	交換 ☒	1	
	交換 ☐		
	交換 ☐		

平成29年 3月 7日

ご署名 林 あさひ



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。