

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300255
作業年月日	2019 年 5 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	きたむら内科クリニック 様		TEL: 045-750-3360
所在地	神奈川県横浜市磯子区磯子3-13プリリアシティ横浜磯子K 1F		ご担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社		ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/20 停電 E:403

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒ 0~1	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 537
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	9.441ppm	表示

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題は有りません。

装置情報	交換後運転回数: 276	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 138	殺菌/消毒+7L: 942
	リークチェック: 0	自己洗浄: 98.5	7Lコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1			☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 17 日

ご署名 北村 剛 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

