

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成31年3月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301447
作業年月日	平成 31 年 3 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	吉川医院 様		TEL： 03-3561-4010
所在地	東京都中央区銀座1-9-17		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ		ご担当 様
納入年月日	平成 30 年 3 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 / 定期点検シール記入 ☐		
出張/引出	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オゾン水生成注意 及び 異常頻発

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

給水管から水が出ている為 水質不良により エラー発生

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 5/3
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守点検作業実施（初年度無償サービス）次回より有償となります。
給水フィルタを院長先生宛にお見積り

装置 情報	交換後運転回数： 342	更新（リフト）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 137	殺菌/消毒+7L： 205
	リークチェック： ☒	自己洗浄： ☒	アルコール単独： ☒	エア単独： ☒

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

31 年 3 月 14 日

ご署名 道志 真樹子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者