

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 301480
作業年月日	平成 31 年 4 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	安田医院 様		TEL： 03-5666-7038
所在地	東京都江戸川区瑞江1-43-12		ご担当 様
販売店	株式会社 メディセオ 江戸川北支店		ご担当 様
納入年月日	平成 30 年 4 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

8/1 E:110 オゾン水生成異常 E:207 オゾン水生成異常
9/7 E:302 濃度維持異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 472
オゾンセンサ	正常 ☒ 0	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。今回は無償とさせていただきます。次回より有償とさせていただきます。

装置情報	交換後運転回数： 424	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 2/3	殺菌/消毒+7L： 2/1
	リークチェック： 0	自己洗浄： 2/6	7Lコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	1	給水・排水フィルタ		☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 8 日

ご署名 安田 一彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者 作業者

