

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 年 月 日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                         |                                                                       | 製造番号： 100684      |
| 作業年月日 | 平成 31 年 4 月 18 日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間： Hr          |
| 顧客名   | はやし内科クリニック 様                                                                                                                  |                                                                       | TEL： 042-423-0452 |
| 所在地   | 東京都西東京市東町6-6-10西東京メ'イカルモル                                                                                                     |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | ニスコ株式会社                                                                                                                       |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 25 年 3 月 4 日                                                                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6 年 3 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

排水口フィルター交換(劣化)

点検項目

|          |    |                                                                 |              |    |                                                 |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 382    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0                           | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    | <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項はありせん。

|          |              |                                                                             |             |             |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 240 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 1026 | 殺菌/消毒+7L： 0 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 899                                                                   | 7Lコル単独： 0   | エア単独： 3     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水口フィルター     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 18 日

ご署名

林

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

