

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-54230

No. 190710

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
所在地	埼玉県上尾市上尾村田向 453-7		機番	001790
ユーザー名	かしの木内科小児科クリニック 様		納入日	平成 21 年 03 月 27 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	令和 元年 06 月 14 日
返送先	納入先と同じ		出荷日	令和 元年 07 月 06 日

修理依頼・不具合内容

内部清掃

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

洗浄水槽が汚れていましたので、清掃を実施しました。
併せて劣化した部品を交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

1. 分解点検および清掃作業
2. オゾン水濃度測定：0.40～0.54mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）点検・・・・・・正常
4. 運転動作確認・・・・・・・・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・・・・・・・・正常
6. 運転カウンタ・・・・5027

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	P-1 出口チューブ	1	
2	P-2 入口チューブ	1	
3	水槽キャップパッキン	1	
4	ドレンチューブ：フィルタ側	1	
5	ドレンチューブ：電磁弁側	1	

承認



審査



作成

R01.7.10

中澤