

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300610
作業年月日	2019 年 7 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	南原内科クリニック 様		TEL: 03-5993-8803
所在地	東京都北区赤羽北2-26-11		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン		ご担当 様
納入年月日	2015 年 7 月 15 日	保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
消毒槽異常 E:101 - 消毒時給水異常 E:202 - 水位低下異常 E:300 観測値異常 E:302 - 濃度制御異常 E:109 - オゾン発生異常 E:215			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 538
オゾンセンサ	正常 ☒ 0	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	□		□
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題はありません。鉛字印刷機で印刷。			

装置 情報	交換後運転回数: 1375	更新（別表）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 5839	殺菌/消毒+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 19	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	鉛字印刷機		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 南原 奈月	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者