

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 9 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100227
作業年月日	2019 年 9 月 17 日		作業時間: / Hr
顧客名	中野医院 様		TEL: 0279-22-1219
所在地	群馬県渋川市渋川 893-33		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2011 年 6 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E201x2, E202x2, E200x2, E209x1, E302x1			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 632
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ EDR-000-G17, HW/64
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数: 190	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 11	殺菌/消毒+7L: 212
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	アルコール消毒液 (計)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒377-0008 渋川市渋川 893 番地 33
 内科・循環器科 中野医院
 リハビリテーション科

管理者 中野 正 印 幸
 TEL 0279-22-1219

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
早坂	2019.9.17 早坂