

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300722
作業年月日	2019 年 10 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	ヴィナシス金町内科クリニック 様		TEL: 03-5876-9416
所在地	東京都葛飾区金町6-2-1 ヴィナシス金町ブライコート2F214		ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社		ご担当 様
納入年月日	2015 年 12 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/1 E:202 消毒時給水異常
10/10 E:101 消毒時異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施、新しいポンプに取り換え

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 617
オゾンセンサ	正常 ☒ ON	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありませんが、酸素ポンプの交換をお願いします。

装置 情報	交換後運転回数: 1537	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 2254	殺菌/消毒+7L: 1939
	リークチェック: 1	自己洗浄: 45	7L単独: 149	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1			☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

木下 一史

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

