

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         |                                                                       | 製造番号: 301511      |
| 作業年月日 | 2019 年 7 月 25 日                                                                                                               |                                                                       | 作業時間: Hr          |
| 顧客名   | KY胃腸クリニック 様                                                                                                                   |                                                                       | TEL: 048-852-0710 |
| 所在地   | 埼玉県さいたま市中央区上落合4-2-3井ビル1F                                                                                                      |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 東邦薬品株式会社                                                                                                                      |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2018 年 7 月 19 日                                                                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張/引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/14 F:200 酸欠圧力異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 803    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0                           | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。今回はサージとなりまして次回より  
有償¥70,000(税別)となります。

|      |                              |            |               |
|------|------------------------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 1262 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌/消毒: 802 | 殺菌/消毒+7L: 460 |
|      | リークチェック: 0                   | 自己洗浄: 251  | 7Lコール単独: 0    |
|      |                              |            | エア単独: 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 平賀 康司 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |