

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-68329

No. 181220

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	安どうクリニック 様	機番	100091
環営	所在地	静岡県富士市五貫島69	納入日	平成23年04月08日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成30年11月14日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成30年12月17日

修理依頼・不具合内容

10/26～11/2 殺菌時給水異常（E:202）頻発
運転中に水位が下がる現象が発生した。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

給水工程中に排水栓が完全に閉まらない状態を確認しました。
この状態が続くと水槽の水が排水側に抜けて水が貯まらず給水異常が発生します。

排水栓を上下に動かす「ポップアップ」の故障が原因で、これを交換して復旧いたしました。

写真1：ポップアップ動作

写真2：交換部品一式

正常



閉まらない



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：17 殺菌：21、殺菌+アルコール：2201、リークチェック：2
自己洗浄：1665、アルコール単独：3、エア単独：2

—以上—

承認



審査



作成

H30.12.20

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	ドレンバルブASSY	1式	
2	マニホールド周辺チューブ	1式	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528