

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 190905

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	永田外科 様	機番	300048
環営	所在地	神奈川県高座郡寒川町倉見 3793-3	納入日	2013年09月06日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		2019年05月27日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2019年08月29日

不具合内容

電源が入らない

（経緯）2018年6月19日 保守点検時にタッチパネルを交換している

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします。

分解点検したところ、電気系統に問題は無く、タッチパネルが単独で故障していました。過去の修理事例から、コントロール基板の関与が考えられるので、これも交換しました。

2019年度の定期保守点検も実施いたしました。

写真1：定期交換部品一式

写真2：タッチパネル、コントロール基板



[2] 修理・点検内容

1：部品交換・写真と下表をご参照ください

2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69 ppm・正常

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	コントロール基板	1枚	
2	タッチパネル	1台	
3	定期交換部品	1式	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528

承認

若
19.9.5
井

審査

中
19.9.5
澤

作成

R01.9.05
中澤