

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 24 日

販売名 / サービス Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 301448 作業年月日 2020年 3 月 24 日 作業時間 Hr
顧客名	青木クリニック 様	TEL: 03-5878-3063
所在地	東京都江戸川区宇喜田町1039-1 エセラージュ船堀102	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 13 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒ 出張・引取 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
2020年 定期保守点検	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 387
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒ (カサあり)
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒ ホットリブ
トレイ 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0207 / T03C
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項 異常ありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数: 415 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 292 /	殺菌/消毒+7h: 634 /
	リークチェック: 0 自己洗浄: 407	7hコ-ル単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 14061819		
オゾンセンサー	☒	1
No. 180206-005		
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ; 水槽側	☒ 2
接続コネクタ; チューブ側	☒ 2
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☒
水フィルター	☒
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 24 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤