

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 3 月 19 日

販売名 / サビ・スニャル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500221
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 3 月 19 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	くすのき内科クリニック 様	TEL: 042-529-7101
所在地	東京都立川市高松町2-26-3 東邦ビル1階	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 925
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ 汚物ポケット交換	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒ JIS ESR-000-67
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / 712A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数: 65 → 0	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 65 / 62	殺菌/消毒+7h: 0 / 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 61	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 16082445		
オゾンセンサー	☒	1
No. 140708-002		
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒
排水栓	☒
接続コネクタ; 水槽側	☒
接続コネクタ; チューブ側	☒
オゾン水濃度計用フィルタ	☒

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☒
水フィルター	☒ 1
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 19 日


ご署名

島田 陽子

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

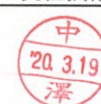

中澤