

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 17 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 100425 作業年月日 2020 年 3 月 17 日 作業時間 Hr
顧客名	村田医院 様	TEL: 03-3425-2612
所在地	東京都世田谷区豪徳寺2丁目16-25	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2012 年 3 月 26 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 2 回目 出張 ☒ 引取 ☐ 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年 定期保守点検

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 417
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0.107 / T01.A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

次回タッチパネルの交換をご検討ください

装置情報	交換後運転回数: 810 → 0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 944 /	殺菌/消毒+7日: 0 /
	リークチェック: 0 自己洗浄: 2	7日コ-単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☒ 2	水フィルター	☐
	☐		接続コネクタ; チューブ側	☐		☐
			オゾン水濃度計用フィルター	☒ 1		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 村田 昌隆 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤