

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-72173

No. 200422

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	小山内科消化器科クリニック 様	機番	301105
環営	所在地	東京都目黒区上目黒 3-2-2	納入日	2017年03月16日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2019年07月02日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2020年04月16日

修理依頼・不具合内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果

タッチパネルが起動して「OED-1000S」から次の画面に進まないことを確認しました。
分解点検したところ、コントロール基板の回路が故障しており、これが
原因でタッチパネルからの電気信号を受け付けずに起動不良が発生しました。
この部品を交換し、併せて 2020年保守点検 を実施いたしました。

写真：交換部品



〔2〕作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.71 ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：装置情報

交換後運転回数：260 消毒：50、消毒＋アルコール：447、リークチェック：0
自己洗浄：397、アルコール単独：0、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	定期交換部品 オゾン水濃度計、排水栓、脱気フィルタ、触媒、センサ	1 式	写真なし 濃度計 52002027 パルズ577

承認

若
20.4.22
井

責任技術者

中
20.4.22
澤

作成

R02.4.22

中澤

（株）IHI アグリテック（旧社名：IHI シバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528