

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 5 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500264
作業年月日	2020 年 5 月 27 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	高橋外科内科 様		TEL: 028-647-3434
所在地	栃木県宇都宮市砥上町194-1		ご担当 様
販売店	サンメディックス株式会社		ご担当 様
納入年月日	2019 年 5 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
E202x5, E111x4, E401x2, E	
不具合原因、作業内容	
オーバーサイズ エアロージ実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 1112
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラム バージョン 正常 ☒ Ver. 030417124
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 859 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 561 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 0
	消毒+アル (総運転回数): 298	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 304
	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 12030941			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄 - 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	2020 年 5 月 27 日 栃木県宇都宮市砥上町194番1 高橋外科・内科 ご署名 院長 高橋 昇 TEL 028-647-3434
---	---

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	2020.5.27
作業者	昇