

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 9 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300196
作業年月日	2019 年 9 月 12 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	篠崎内科クリニック 様		TEL: 028-667-7722
所在地	栃木県宇都宮市清原台 6-1-13		ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社		ご担当 様
納入年月日	2014年 2 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E209x3, E213x1, E109x1, E108x2 E215x3, E302x1			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 717
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ (交換)
☐		☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 1367	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒: 4737	殺菌/消毒+アル: 3677
	リークチェック: 2	自己洗浄: 1516	アルコール単独: 50	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドホルダー		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	殺菌チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019 年 9 月 12 日

篠崎 研

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

早坂

2019.9.12

