

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年6月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300719
作業年月日	2020年6月15日		作業時間: 1 Hr
顧客名	みと内科クリニック 様		TEL: 0285-85-3101
所在地	栃木県真岡市熊倉町大谷3252-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016年1月20日	保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴 → 水温高異常 x 4
消毒時結水異常 x 2
水温高異常、運転不可

不具合原因、作業内容
→ 基盤交換
再現せず。

点検項目		点検結果	
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 618
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒ (取付にヒビ有)	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
エアーの再現が出来ませんでした。念のため基盤を交換致しました。

装置情報	交換後運転回数: 96	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 853	殺菌/消毒+アル: 839
	リークチェック: 0	自己洗浄: 782	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ; 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		基盤		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年6月15日

ご署名 三戸英章 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

早坂

2020.6/15

