

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100232
作業年月日	2019 年 11 月 15 日		作業時間: Hr
顧客名	みずほ台病院 様		TEL: 0492-52-5121
所在地	埼玉県富士見市西みずほ台2-9-5		ご担当 様
販売店	株式会社メディセオ		ご担当 様
納入年月日	2011 年 7 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 9 年 9 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 883
オゾンセンサ	正常 ☒ ONI	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機に問題はありますが。給水圧降下により若干の水漏れが確認でき、
此点エア接続部に2ヶ所確認しました。

装置 情報	交換後運転回数: 1775	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 8207	殺菌/消毒+7L: 7888
	リークチェック: 107	自己洗浄: 2282	7Lコル単独: 188	エア単独: 27

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	オゾン水濃度計		☒	1
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	延長ホース(給水)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 11 月 15 日

ご署名 小暮 久恵 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

