

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 12 月 19 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500041
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2019 年 12 月 19 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	古畑病院 様	TEL: 03-3424-0705
所在地	東京都世田谷区池尻2-33-10	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2019年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 643
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒ 鉗子ゴム電装
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項

原水の水質異常が12/13,17に発生していることが、水道水中の泥が原因と
思われています。

装置 情報	交換後運転回数: 1561	更新 (リット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 976 / 23	殺菌/消毒+7A: 591 / 576
	リークチェック: 274	自己洗浄: 228	7Aコ-ル単独: 9	エア単独: 65

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 51912350		
オゾンセンサー	☒	1
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ; 水槽側	☐
接続コネクタ; チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☐
水フィルター	☒ 1
水槽	☐
鉗子ゴム	☒ 2

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 19 日

〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-33-10
古畑病院 TEL:03(3424)0705


ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者

作業者

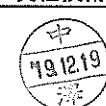

中澤