

## 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190527

発行日 令和元年5月27日

|               |                                                                             |                                                            |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名           | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                            | 製造番号: 100632                                  |
| 作業年月日         | 令和元年 5月10日                                                                  |                                                            | 作業時間: Hr                                      |
| 顧客名           | 寒川病院 様                                                                      |                                                            | TEL: 0467-75-6680                             |
| 所在地           | 神奈川県高座郡寒川町宮山193                                                             |                                                            | 担当 様                                          |
| 販売店           |                                                                             |                                                            | 担当 様                                          |
| 納入年月日         | 平成 24年 2月 24日                                                               | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分          | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目 |                                                            | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・ <u>引取</u> | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 |                                                            | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検 および オーバーホール

不具合原因、作業内容

ポンプ類、電磁弁、配管チューブなど、主要部品を交換いたしました。

点検項目

|          |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 599    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・交換部品の詳細は別紙「100632号 工事写真」をご参照ください。

|          |                                           |            |                       |
|----------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1688 → 0 更新 (リット) <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌: 8199   | 殺菌+アル: 5098           |
|          | リークチェック: 5038                             | 自己洗浄: 1458 | アルコール単独: 3<br>エア単独: 7 |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量  | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量  |
|--------------|-------|-------------------------------------|-----|---------------|-------|-------------------------------------|-----|
| 定期交換部品       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 式 | 酸素電磁弁         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 式 |
| メインポンプ、排水ポンプ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 式 | 給水電磁弁         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 個 |
| エアポンプ、排気ファン  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 式 | アルコールライン電磁弁   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 個 |
| ドレンバルブ ASSY  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 台 | 配管パッキン、フタパッキン |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 式 |
| マニホールド電磁弁    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 式 |               |       | <input checked="" type="checkbox"/> |     |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者



中澤

1: 定期交換部品 一式



2: メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ排気ファン、ドレンバルブASSY



3: マニホールド電磁弁、酸素電磁弁、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁、配管パッキン、フタパッキン

