

修理報告書（引取り修理）

修 理 依 頼 番 号	02-73158	No. 191204
----------------	----------	------------

配 布 先	納 入 先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿	機 種	OED-1000
客先	顧 客 名	寒川病院 様	機 番	100632
環営	所 在 地	神奈川県高座郡寒川町宮山193	納 入 日	2012年2月24日
環品	点 検 者	中澤一裕	作 業 時 間	2019年9月18日
	返 送 先	納入先と同じ	出 荷 日	2019年11月22日
計	3			

修理依頼・不具合内容

水槽より水漏れ

※2019年5月13日にオーバーホール実施後、710回運転して発生した。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。下記ご報告いたします。

水槽下部の溶接部分に亀裂が生じてそこから水が漏れていました。
水槽全体を交換して復旧いたしました。

写真1：水漏れ部分



写真2：交換部品一式



[2] 性能確認

1：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.70ppm・・・正常

2：運転確認・・・正常

[3] 出荷時の装置情報

交換後運転回数：710 消毒：8697、消毒＋アルコール：5312、リークチェック：5245
自己洗浄：1516、アルコール単独：3、エア単独：8

承認
若井
19.12.04
責任技術者
中澤
19.12.04
作成
R01.12.4
中澤

交 換 部 品			
部品番号	部品名称	数量	備 考
	水槽	1	
	パッキン	4	

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528