

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-73158

No. 191204

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 東京支店 殿			機種	OED-1000
客先	顧客名	寒川病院 様			機番	100632
環営	所在地	神奈川県高座郡寒川町宮山193			納入日	2012年2月24日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2019年9月18日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2019年11月22日
計	3					

修理依頼・不具合内容

水槽より水漏れ

※2019年5月13日にオーバーホール実施後、710回運転して発生した。

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。下記ご報告いたします。

水槽下部の溶接部分に亀裂が生じてそこから水が漏れていました。
水槽全体を交換して復旧いたしました。

写真1：水漏れ部分



写真2：交換部品一式



[2] 性能確認

1：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.70ppm・・・正常

2：運転確認・・・正常

[3] 出荷時の装置情報

交換後運転回数：710 消毒：8697、消毒＋アルコール：5312、リークチェック：5245
自己洗浄：1516、アルコール単独：3、エア単独：8

承認

若井
19.12.04

責任技術者

中澤
19.12.04

作成

R01.12.4

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水槽	1	
	パッキン	4	

（株）IHI アグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

Ver.3.1