

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 7 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300418
作業年月日	令和 2 年 7 月 30 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	竹田クリニック 様		TEL： 03-3371-4114
所在地	東京都新宿区北新宿3-1-21 みどりビル3階		ご担当 様
販売店	本郷いわしや		ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/8 酸素センサー異常 E:200
7/20-27 流量低下故障 E:105
7/24 410ネルの動作不具合。

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

7/24 410ネルの交換により復帰 (修理済)

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 523
オゾンセンサ	正常	☒ 0.1	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒ キット有	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

5/8のとき 410ネルの交換を実施しました。(無償) 欠損した代用品は ¥70,000 (税別) となります。
今後は定期的にメンテナンスを実施して下さい。

装置情報	交換後運転回数： 2057	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 3154	殺菌/消毒+7L： 150
	リークチェック： 0	自己洗浄： 57	7Lコル単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	ディスクバルブ	無償 (今回)	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 佐々木 菜穂 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者