

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 7 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500303
作業年月日	2020 年 7 月 22 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	塚越クリニック 様		TEL: 0279-60-7700
所在地	群馬県渋川市渋川 3902-5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 7 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E209x1, E110x4, E207x4, E302x2

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1003
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03041 T124

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 182 更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数): 182 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 5分 x 4, 10分 x 1
	消毒+アル (総運転回数): 0	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 13 / 7Lノール単独: 0 エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No. 18103345			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
180424-006			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 7 月 22 日

ご署名 都丸 朋子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
早坂	2020.7.22 早坂