

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和2 年 9 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500352	
作業年月日	令和2 年 9 月 7 日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	間阪内科 様		TEL	0869-52-1717	
所在地	岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸185-2		ご担当	院長 様	
販売店	株式会社エバルス		ご担当	水野 様	
納入年月日	2019 年 8 月 20 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒				
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 815
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 180 更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数)： 180 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 1 (55)	
	消毒+アル (総運転回数)： 2	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 0	
	リークチェック： 1	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☐	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	年 2.9 月 - 7 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	医療法人 間阪内科
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸185-2
	ご署名 院長 間阪 拓郎

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	井上