

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020年 8 月 31 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500389
作業年月日	2020 年 8 月 31 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	亀山クリニック 様		TEL: 0285-83-3212
所在地	栃木県真岡市亀山1-31-2		ご担当 様
販売店	株式会社アイエスエム		ご担当 今岡 様
納入年月日	2019 年 8 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ナシ

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 670
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03041712A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 263 更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 11 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 5回 x 10 分
	消毒+アル (総運転回数): 252	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 5回 x 252
	リークチェック: 0	自己洗浄: 255
	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No. 1107709			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
180524-003			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 8 月 31 日

ご署名 田中 英樹 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者

早坂

2020. 8/31