

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 10 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 301084
作業年月日	2020 年 10 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	薬師堂クリニック 様		TEL: 03-3500-5090
所在地	東京都千代田区永田町2-14-2		ご担当 様
販売店	ニスコ株式会社		ご担当 様
納入年月日	2017 年 3 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E: 108 光量低下注意
E: 402 排水異常

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施 オゾン濃度計交換により復帰。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水温度計動作	正常	☒ パルス数 335
オゾンセンサ	正常	☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項はありませぬ。

装置情報	交換後運転回数: 776	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 326	殺菌/消毒+7L: 870
	リークチェック: 0	自己洗浄: 741	7Lコル単独: 8	エア単独: 362

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1			☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2 年 10 月 5 日

ご署名 立野 愛衣

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者



立野 愛衣