

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2年 2 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301082
作業年月日	令和 2 年 2 月 19 日	作業時間： Hr
顧客名	町立小鹿野中央病院 様	TEL： 0494-75-2332
所在地	埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300	ご担当 様
販売店	日本メガケア株式会社	ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 2 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・なし
・原水測定異常 E:213 2/15・3/1・12/10・12/17・12/17
・オゾン水生成異常 E:110 8/15・9/30

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 577
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題はありません。

装置情報	交換後運転回数： 1320 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1561	殺菌/消毒+7L： 1963
	リークチェック： 0 自己洗浄： 407	7Lコル単独： 5	エア単独： 16

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水用新型活性炭フィルタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 黒澤和範 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

