

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2 年 3 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500429
作業年月日	2020 年 3 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	北川内科クリニック	様	TEL: 0277-44-7706
所在地	群馬県桐生市錦町2-12-2		ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルインス販売株式会社		ご担当 様
納入年月日	2019 年 3 月 29 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

定期点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水温度計動作	正常 ☒ バルブ数 546
オゾンセンサ	正常 ☒ 5	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン温度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0364 / TRA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。主プログラム更新によりリセットを行いました。
ご了承ください。

装置 情報	交換後運転回数: 52 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒(総運転回数): 6 / 消毒(洗剤洗浄あり): 1
	消毒+アル(総運転回数): 46	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 46
	リークチェック: 0	自己洗浄: 43
	7L-8単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水温度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水温度計用フィル	☒ 1	給水バルブ (新)	☒ 1
				☐	排水バルブ	☒ 1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2 年 3 月 2 日

ご署名 前原満津美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野