

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 3 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300816
作業年月日	令和 2 年 3 月 11 日	作業時間： Hr
顧客名	月岡内科医院 様	TEL： 027-346-1226
所在地	群馬県岩鼻町239-3	ご担当 様
販売店	株式会社 タカサキ医療器	ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 17 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

4/1・7/20 清掃給水異常 E:202
7/15 オゾンリーク異常 E:204

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐
トレー	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒

0.2

殺菌槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☒
殺菌チューブ類	正常 ☒
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

バルブ数 612

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 271 更新（リセッ）実施・未実施	殺菌/消毒： 1132	殺菌/消毒+アル： 11
	リークチェック： 0 自己洗浄： 431	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽/チューブ		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 渡辺信子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者



Ver.3.1