

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

02-54232

No. 200115

|     |     |                 |      |             |
|-----|-----|-----------------|------|-------------|
| 配布先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 東京支店 殿 | 機種   | OED-1000S   |
| 客先  | 顧客名 | 仁愛内科クリニック 様     | 機番   | 301408      |
| 環営  | 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 3-7  | 納入日  | 2018年02月26日 |
| 環品  | 点検者 | 中澤一裕            | 作業時間 |             |
|     |     |                 | 受付日  | 2019年09月03日 |
| 計   | 返送先 | 納入先と同じ          | 出荷日  | 2020年01月09日 |

## 修理依頼・不具合内容

タッチパネル起動時に「OED-1000S」の画面から移行しない

## 不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。下記の通りご報告いたします。

### 〔1〕点検結果

点検したところ、タッチパネルが故障しておりました。このため  
コントロール基板～タッチパネルの信号が不安定で、上記の現象が発生しました。

不具合に関する主要な部品を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



### 〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 $0.7 \pm 0.2$ ppm）：0.72 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報  
交換後運転回数：11 殺菌：11、殺菌＋アルコール：2、リークチェック：0  
自己洗浄：0、アルコール単独：0、エア単独：0

### 〔3〕お知らせ

修理預かり期間を考慮して、お客様の定期点検時期は今年の6月です。  
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称     | 数量 | 備考 |
|------|----------|----|----|
| 1    | タッチパネル   | 1台 |    |
| 2    | コントロール基板 | 1枚 |    |

承認

若  
20.1.15  
井

責任技術者

中  
20.1.15  
澤

作成

R02.1.15

中澤

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパワ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528