

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 3 月 18 日

販売名 / サービス Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 300804 作業年月日 2020 年 3 月 18 日 作業時間 Hr
顧客名	共和堂医院 様	TEL: 03-3911-0665
所在地	東京都北区東十条2-5-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒ 出張・引取 修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2020年 定期保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 608
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒ アースなし
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒ フジCAS03
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 / T02C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

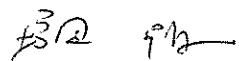
装置情報	交換後運転回数: 834 → 0 更新 (リセット) ☒ 未実施	殺菌/消毒: 1737 /	殺菌/消毒+バル: 1673 /
	リークチェック: 0	自己洗浄: 930	バル単独: 25
			エア単独: 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒ 3
交換後 No. 1312164)			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
No 130619-006			接続コネクタ; チューブ側	☐	マニホールドチューブ	☒ 5
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 3 月 18 日

ご署名  印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者

 中澤