

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 191121

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 上尾本社 殿			機種	OED-1000S Plus
客先	顧客名	北川内科クリニック 様			機番	500429
環営	所在地	群馬県桐生市錦町 2-12-2			納入日	2019年03月29日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2019年09月09日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2019年11月05日
計	3					

修理依頼・不具合内容

電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

修理遅れまして、大変申し訳ありませんでした。下記の通りご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

直流電源が故障して、タッチパネル及び圧力センサーに電源が入らない状態でした。分解点検したところ、直流電源に溶液が付着しており、洗剤（アイエスウォッシュ）であることが判明しました。こぼれた洗剤がカバーを浸透して機械内部の直流電源にかかったものと推察いたします。

写真1：洗剤の浸透経路

写真2：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.73 ppm・・・正常
- 3：装置情報

交換後運転回数：32 消毒：1/0、消毒＋アルコール：31/31、リ－チェック：0
自己洗浄：27、アルコール単独：0、エア単独：0

承認
若井
19.11.24
審査
中澤
19.11.24
作成
R01. 11. 21
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	直流電源	1台	
2	アッパーカバー	1式	
3	タッチパネル	1台	

（株）IHI アグリテック（旧社名 IHIシパウ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528