

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHI 用

お客様	名称	製造番号	ご確認	金子 玲
	Nicoキッズデンタルクリニック 自由が丘 様	100551		
	住所	納入日		
	東京都世田谷区奥沢5-41-8オオギヤハウス1F	2021年 8月 5日		
		納入検査実施者		
		エムシーサービス株式会社 金子 貴樹		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目		
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認		
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態		
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ		
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと		
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御		運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認		
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認		
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)		
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換		
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)		
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致		
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付		
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明		
			給湯温度(45～50℃)	その他	✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果		☑	良好	トシ 合格
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			☐	不良	
	✓	電源スイッチの作動状態					
	✓	SDカードの挿入・取外性					
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)					
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ					

特記事項

IHI用

お客様	名称	製造番号	ご確認	金子 陽子
	NicoキッズテンタUVクソニック自由が丘 様	300182		
	住所 東京都世田谷区奥沢5-41-8オオキヤハウスIF	納入検査実施日 2021年8月5日		
		納入検査実施者 IAシーサービズ株式会社 金子・常間		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ			✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレイのキズ・汚れ	✓		本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。	
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性	✓		アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性			✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)	
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		性能評価	✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか			✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	✓		0点調整	
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他		付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと			運転・お手入れ方法の説明	
				✓	装置内運転時異音	

特記事項