

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 10 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301085
作業年月日	令和 2 年 10 月 20 日	作業時間： Hr
顧客名	つつじヶ丘公園西クリニック 様	TEL： 048-778-8057
所在地	埼玉県さいたま市北区吉野町2-189-9	ご担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社 大宮北支店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 3 月 2 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ディスプレイが表示されない。または、されても表示が薄い。

主電源のON・OFFで復帰。その後、4回運転しているが異常が見られない。

不具合原因、作業内容

ディスプレイ及び基盤の動作が不安定（一時的な可能性あり）
ディスプレイ及び基盤の交換により復帰

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 595
オゾンセンサ	正常 ☒ 0.1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

今回の費用はサービス致します。

装置情報	交換後運転回数： 391 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 617	殺菌/消毒+7L： 1529
	リークチェック： 1830 自己洗浄： 896	7Lコール単独： 2	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽/チューブ		☐	
オゾン水濃度計		☐		マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		ディスプレイ		☒	1
オゾンセンサー		☐		コントロール基盤		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2020 年 10 月 20 日
横山 晴 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL：03-3816-0444

責任技術者

作業者

